

Attelle d'immobilisation du genou, universelle.

Caractéristiques : Maintien rigoureux du genou en extension par 4 baleines. Parfaite adaptation à toutes les circonférences de jambes grâce à 3 panneaux latéraux mobiles. Sangle de pré-serrage pour une mise en place facilitée.

Composition : Baleines aluminium, mousse de polyuréthane, polyamide, coton.

Indications : Toutes indications de l'immobilisation du genou en extension : lésions ligamentaires, lésions patellaires ou de l'extenseur, urgence et diagnostic différé, genou inexaminable et suspicion de lésion grave.

Contre-indications, précautions d'usage :

Pour une efficacité optimale, veuillez utiliser la taille adaptée et régler la tension en fonction du maintien et du confort souhaité

Méthode de pose :

La pose est faite sous la responsabilité du praticien.

1. Si nécessaire, conformer les baleines aluminium en fonction de la morphologie du patient et du volume du genou.
2. Placer la partie centrale de l'attelle derrière la jambe du patient en veillant à placer les échancrures au niveau de la rotule.
3. Appliquer les panneaux latéraux en veillant à placer les baleines dans l'axe médian de la jambe.
4. Fermer l'attelle en passant les grandes bandes velcro dans leur boucle respective.

Tailles et prises de mesures :

Mesurer la hauteur de la jambe du talon au pli de l'aîne en cm.

Entretien : Laver à la main avec de l'eau froide et du savon doux, puis rincer intégralement. Laisser sécher à l'air libre. Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.

Importé par :



153, Rue Pierre Corneille 69003 LYON